




Sekusept[®] Plus

VLOEIBAAR REINIGEND
DESINFECTIEMIDDEL VOOR MEDISCH
INSTRUMENTARIUM

- ▲ Krachtige reiniger, zonder aldehyden
- ▲ Op basis van Glucoprotamine
- ▲ Volgens RKI en VAH aanbevelingen



Sekusept® Plus

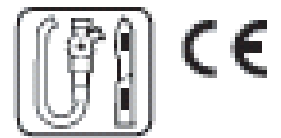

VLOEIBAAR REINIGEND DESINFECTIEMIDDEL VOOR MEDISCH INSTRUMENTARIUM

Eigenschappen	Voordelen
Volgens VAH en RKI aanbevelingen. Werkzaam tegen bacteriën (incl. TBC), fungi, omkapselde virussen, (incl. HIV, HBV en HCV), Adeno en Papova virus	Optimale veiligheid voor de gebruiker
Op basis van Glucoprotamine	Vernieuwende actieve stof van de jaren 2000.
Hoogwaardige bestanddelen	Goede materiaalcompatibiliteit, eveneens geschikt voor gevoelige materialen, zoals flexibele endoscopen. Goedgekeurd door Olympus
Krachtige reinigingscomponenten	Uitstekende reinigende werking, ook bij sterke bevulling. Korte inwerktijd. Toevoeging van corrosie-inhibitoren ter bescherming van het materiaal
Weinig vluchtig, temperatuurbestendige oplossing	Geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden. Aangename geur

TOEPASSING

Voor reiniging en desinfectie van thermostabiele en thermolabele instrumenten, endoscopen en toebehoren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Desinfectieoplossing aanmaken door te verdunnen met water. Voorwerpen in Sekusept Plus oplossing leggen. Letten op volledige onderdompeling. Na voorgeschreven inwerktijd de voorwerpen uit de oplossing nemen en minstens met water van drinkwaterkwaliteit (beter met gedestilleerd of gedemineraliseerd water) afspoelen.

Niet geschikt voor instrumentarium waarvan onderdelen gemaakt zijn uit siliconen.

SAMENSTELLING

Actief bestanddeel per 100 g :
25 g glucoprotamine.

Andere bestanddelen :

Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, parfum, corrosie-inhibitoren

INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.

VERPAKKING / REFERENTIE

Bidon 6 L
Verpakking : 1 x 6 L
Ref. : 3033850

Flacon 2 L
Verpakking : 4 x 2 L
Ref. : 3030890

Werkingspectrum	Conc %	Inwerktijd
Instrumentendesinfectie	3,0 1,0 0,25	5 min 15 min 30 min
Instrumentendesinfectie volgens VAH (inclusief TBC)	1,5 2,5 4,0	1 u 30 min 15 min
Instrumentendesinfectie in ultrasoonbad (tuberculocide volgens DGHM 2001 en EN14563)	3,0	5 min
Actief tegen omkapselde virussen (incl. HIV, HBV, HCV) volgens RKI aanbevelingen 01/2004	1,0	5 min
Adeno, Papova virus	1,5	1 u



Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16 C - 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com